



Pedoman Pencegahan Darah Bocor

Harap diperhatikan, bubuk Det-Sol 5000[®] bersifat higroskopik, maka saat menyentuh permukaan, Det-Sol 5000[®] menyerap lembab dan mendesinfeksi permukaan tersebut. Disarankan agar permukaan dibersihkan terlebih dahulu dengan solution.

Det-Sol 5000[®] telah menjadi bagian dari sebagian besar First Aid Kit (Kotak P3K) dan Paket pencegahan darah bocor di Australia. Di bawah ini terdapat beberapa peraturan keselamatan untuk pemakaian Det-Sol 5000[®]:

- Gunakan sarung tangan dan masker medis
- Taburkan satu atau lebih dari satu sachet Det-Sol 5000[®] di permukaan yang terpengaruh kebocoran. Pemakaiannya tergantung pada ukuran daerah yang kebocoran.
- Diamkan selama 30 detik sampai 10 menit, disesuaikan dengan banyaknya cairan pencemar.
- Tutup dengan tissue atau handuk kertas
- Ambil tissue kertas dan cairan mengental yang telah terserap dan masukkan ke dalam kantong plastik medis dan buanglah ke tempat sampah medis atau kantung khusus untuk bahan berbahaya biologis.
- Tambahkan dan larutkan satu sachet Det-Sol 5000[®] dengan 1 liter air dan basuh daerah yang tercemar dengan solution.
- Buanglah semua sampah secara teratur dan sesuai peraturan setempatnya.